

Інформація для замовлення
Вентильовані вушні вставки

03449

В упаковці 24 шт.
зелені, Ø 7 мм
адаптер 1 шт./упак.

CE

DETAX

GmbH & Co. KG

вул. Карла Цейсса, 4 · 76275 Еттлінген
тел.: 07243 / 510-0 · Факс: 07243 / 510-100
www.detax.de · post@detax.de

**Вушні
вставки**

**Вентильовані вушні
вставки**



24 шт./уп.

DETAX Еттлінген/Німеччина
www.detax.de

Інструкція з використання

Вентильовані вушні вставки виготовлені з поролону з вентиляційною трубкою. Рекомендовано для глибоких вушних зліпків і дітей. Трубка забезпечує чистоту вуха під час встановлення та легке і безпечне виймання вушних зліпків.



Перед застосуванням необхідно оглянути слуховий прохід і барабанну перетинку. Вкладиші не треба встановлювати в разі виявлення незручностей

або больових відчуттів (наприклад, запалення або перфорація барабанної перетинки). Барабанна перетинка завжди має бути захищена вушними вставками.

Введіть вушну вставку пінцетом або допоміжним приладом (помістіть трубку в гніздо прозорого адаптера, Рис. 1) та встановіть її в кінці зовнішнього слухового проходу перед барабанною перетинкою (Рис. 2). Переконайтеся в правильності установки за допомогою отоскопа. Використовуйте зліпочний матеріал, після затвердіння обережно вийміть зліпок. Повторно огляньте вухо.

Instruction for use

Vented impression pads, made of flexible foam with ventilation tube. Especially suitable for deep ear impressions and children. The tube guarantees ear clearing during application and an easy and secure removal of the ear impression.



Before taking an impression, the auditory canal and eardrum have to be examined. If distinctive features are found (e.g. inflammations, perforation of the eardrum or tubes) impression

must not be taken. The eardrum must always be protected with an impression pad.

Place the impression plug using tweezers or application assistant (place the tube into the slot of the transparent pad-adapter, Fig. 1) at the end of the external auditory canal in front of the eardrum (Fig. 2). Ensure correct fitting of the pad using an otoscope. Apply the impression material, after curing remove the impression carefully. Re-examine the ear.